



SO O O DUURZAAM
IS **MUCOPREN®** SOFT

COMFORTABELE SOFTLINER



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

MUCOPREN® SOFT

Prothetische relining

Mucopren® Soft is een comfortabele en doeltreffende softliner voor langdurige relining op basis van A-silicone voor de **directe en indirecte toepassing**

Speciale langdurige hechting:

Uitstekende hechting aan prothesekunststof dankzij de gepatenteerde Mucopren® Adhesief

Unieke afdichting door het zeer gladde, hydrofobe siliconenoppervlak:

Remt bacteriële kolonisatie en zorgt zo voor hygiënische omstandigheden rondom de prothese¹⁾



Toepassingsvideo

Eenvoudige behandeling & snelle verwerking

Snellere procedure en kortere verwerkingstijden zorgen voor een snel en soepel proces in de praktijk en het laboratorium.

Ondersteunt het genezingsproces na een implantaatbehandeling

Zeer geschikt voor gebruik in de implantologie voor probleemloze osseo-integratie

Hoog draagcomfort

De Mucopren® Soft reliner is volledig geur- en smaakloos en maakt het dragen van de prothese zo aangenaam mogelijk.

Marktleider op het gebied van softreliners met een extreem lange draagtijd³⁾



MUCOPREN® SOFT DOET WAT HET BELOOFT



VERDERE AANWIJZINGEN



- Voor het vervaardigen van **langdurige zachtblijvende relining**.
- Voor het ontlasten van het operatieve gebied na het plaatsen van de **implantaten**.
- Voor het compenseren van slijmvlieslocaties met verschillende weerstanden.
- Voor het ontlasten bij gevoelige botranden.
- Voor het ontlasten bij gevoelige gehemelte-slijmvlies (stomatitis prothetica)
- Voor het vervaardigen en/of relinen van obturatoren.
- Voor het maken en relinen van obturators

Voordelen van het gebruik van het verbeterde Adhesief

SLECHTS

» **1X AANBRENGEN**



CHAIRSIDE

3 MIN

De verwerkingstijd is gereduceerd tot slechts 3 minuten na het verwijderen van de mond. Geen waterbad nodig.



LABSIDE

3 MIN

De verwerkingstijd is gereduceerd tot slechts 3 minuten in het waterbad of de hoge drukpan.

¹⁾ Resultaat van in-vitro-onderzoeken waarin werd aangetoond dat de groei van *Candida albicans* werd voorkomen dankzij het gladde siliconenoppervlak.

²⁾ Vergelijken met de vorige groene mengtip voor Mucopren® Soft (Ø 6.5 mm)

³⁾ volgens GfK (een Duitse vereniging voor consumentenonderzoek)

MUCOPREN® SOFT – HET ASSORTIMENT



Mucopren® Soft

Mucopren® Soft Basic Set	REF 28105	50 ml Mucopren® Soft, 50 ml verzegelingssilicone, 10 ml adhesief, 6 witte mengtips, 16 oranje mengtips, 1 borstelhouder, 20 borstels voor eenmalig gebruik, 1 stalen frees, accessoires
Mucopren® Soft Normal pack	REF 15687	2 x 50 ml Mucopren® Soft, 6 witte mengtips
Mucopren® Verzegelingssilicone	REF 15686	50 ml Mucopren® Verzegelingssilicone, 8 oranje mengtips
Mucopren® Adhesief	REF 14203	10 ml Mucopren® Adhesief
Mengtips wit	REF 17234	50 stuks voor Mucopren Soft
Mengtips oranje	REF 17217	60 stuks voor verzegelingssilicone MB 3.2
Adhesief Remover	REF 14207	10 ml Adhesief Remover



Technische gegevens

Productnaam	Mengverhouding	Verwerkingstijd bij 23 °C ≤	Uithardingstijd bij 35 °C ≥	Drukpan	Totale uithardingstijd ≥	Shore hardheid (ongeveer.)
Mucopren® Soft – Directe toepassing	1:1	2:15 min.	3:15 min.	Niet van toepassing	5:30 min.*	A 28
Mucopren® Soft – Indirecte toepassing	1:1	2:15 min.	Niet van toepassing	3:00 min.	> 3 min.	A 28
Mucopren® Soft Verzegelingssilicone	1:1	1:30 min.	Niet van toepassing	Niet van toepassing	6:30 min. at 23°C	A 33

*Totale uithardingstijd (verwijderingstijd uit de mond) vanaf het aanbrengen in de prothese

Voor meer informatie vraag uw
dental depot of direct via ons:

Kettenbach Dental Benelux
Takkebijsters 73A
4817 BL Breda

info@dental4.nl
www.dental4.nl



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

Ontdek alle voordelen en toepassingen, schrijf je in via info@att-adviesentraining.nl



022746_5023